

نحوه ی انجام دیتاهای تهران

1:دکتر صائمی: Saemi

اسم دیتاها رو تغییر میدهیم

Text را انتخاب میکنیم

سمپل ریت:500

دستگاه در نوروگاید:Other

حتما Montage در نوروگاید LinkEars باشد

در ران دستگاهی که انتخاب میکنیم Science Beam:

***نکته 1 :کمترین عدد EC و بیشترین عدد EO**

***نکته 2: در دیتاهای دکتر صائمی همیشه MOOD را در ران میزنیم.**

2:دکتر مسجدی: Masjedi

Text را انتخاب میکنیم

اسم دیتا رو تغییر میدهیم

سمپل ریت:500

دستگاه در نوروگاید:Other

حتما Montage در نوروگاید LinkEars باشد

در ران دستگاهی که انتخاب میکنیم Negarandishan:

3:دکتر محمدحسنی: Mohammadhasani

اسم دیتا رو تغییر میدهیم

EDF را انتخاب میکنیم

چون EDF را زدیم سمپل ریت نداریم

اسم دستگاه Mitsar

رفرنس LE

حتما Montage در نوروگاید LinkEars باشد

دستگاهی که در ران انتخاب میکنیم: Other

4:دکتر قمی: Qomi

اسم دیتا رو تغییر میدهیم

Text را انتخاب میکنیم

سمپل ریت:500

دستگاه در نوروگاید:Other

حتما Montage در نوروگاید LinkEars باشد

در ران دستگاهی که انتخاب میکنیم Negarandishan:

5:دکتر عاطفه صفوی: AtefeSafavi

اسم دیتا رو تغییر میدهیم

EDF را انتخاب میکنیم

چون EDF را زدیم سمپل ریت ندارد.

دستگاه در نوروگاید: Mitsar

رفرنس: LE

حتما Montage در نوروگاید LinkEars باشد

دستگاهی که در ران انتخاب میکنیم: New mitsar

6: دکتر جیبی که به اسم علیرضا امیرشاهی ارسال میشود: Dr Rajabi

اسم دیتا رو تغییر میدهیم

EDF را انتخاب میکنیم

چون EDF را زدیم سمپل ریت ندارد

دستگاه در نوروگاید: Mitsar

رفرنس: LE

حتما Montage در نوروگاید LinkEars باشد

دستگاهی که در ران انتخاب میکنیم: Other

7: دکتر علیرضا صفوی: Safavi

اسم دیتا رو تغییر میدهیم

EDF را انتخاب میکنیم

چون EDF را زدیم سمپل ریت ندارد

دستگاه در نوروگاید: Mitsar

رفرنس: LE

حتما Montage در نوروگاید LinkEars باشد

دستگاهی که در ران انتخاب میکنیم: Other

8: دکتر صادقی رونیزی: Sadeghi

اول اسم دیتا رو تغییر میدهیم

EDF را انتخاب میکنیم

چون EDF را زدیم سمپل ریت ندارد

دستگاه در نوروگاید: Neuron-spectrum 4/p

رفرنس: LE

حتما Montage در نوروگاید LinkEars باشد

دستگاهی که در ران انتخاب میکنیم: Neuronspectrum

9: دکتر جوادی که به اسم آنوشا سمیعی ارسال میشود: Javadi

اول اسم دیتا رو تغییر میدهیم

مثل دیتای خودمان برایش EDF و Text ایجاد میکنیم

در نورگاید مونتاژ LinkEars و سمپل ریت 250 و دستگاه Mitsar را انتخاب میکنیم عین داده های خودمون

مونتاژ در نوروگاید حتما LinkEars باشد.

دستگاهی که در ران انتخاب میکنیم: New mitsar

10:خانم مازندارانی:Ms Mazandarani

اول اسم دیتا رو تغییر میدهیم
EDF را انتخاب میکنیم
چون EDF را زدیم سمپل ریت ندارد
دستگاه در نوروگاید:Unknown/Other
رفرنس:LE
حتما Montage در نوروگاید LinkEars باشد
دستگاهی که در ران انتخاب میکنیم:eWave

11:دکتر عادل Adel

اول اسم دیتا رو تغییر میدهیم
Text را انتخاب میکنیم
سمپل ریت را تغییر نمیدهیم همان 128 میماند
دستگاه در نوروگاید:Unknown/Other
حتما Montage در نوروگاید LinkEars باشد
دستگاهی که در ران انتخاب میکنیم:Science Beam

12:دکتر صدیق:Seddigh

اول اسم دیتا رو تغییر میدهیم
EDF را انتخاب میکنیم
چون EDF را زدیم سمپل ریت ندارد
دستگاه در نوروگاید:Mitsar
رفرنس:LE
حتما Montage در نوروگاید LinkEars باشد
دستگاهی که در ران انتخاب میکنیم:Other

13:خانم مریم یزدان پناه:Soshiyan Center

اول اسم دیتا رو تغییر میدهیم
EDF را انتخاب میکنیم
چون EDF را زدیم سمپل ریت ندارد
دستگاه در نوروگاید:Mitsar
رفرنس:LE
حتما Montage در نوروگاید LinkEars باشد
دستگاهی که در ران انتخاب میکنیم:Other

در قسمت اسم دکتر این اسم را وارد میکنیم:Soshiyan Center Clinic

14:دکتر ضرغامی:Zarghami

اول اسم دیتا رو تغییر میدهیم
EDF را انتخاب میکنیم
چون EDF را زدیم سمپل ریت ندارد

دستگاه در نوروگاید: Mitsar

رفرنس: LE

حتما Montage در نوروگاید LinkEars باشد

دستگاهی که در ران انتخاب میکنیم: Other

15: دکتر مهسا حیدری: Heydari

اول اسم دیتا رو تغییر میدهیم

EDF را انتخاب میکنیم

چون EDF را زدیم سمپل ریت ندارد

دستگاه در نوروگاید: other

رفرنس: LE

حتما Montage در نوروگاید LinkEars باشد

دستگاهی که در ران انتخاب میکنیم: NeuroSurve

16: دکتر حشمت اله رحیمی: Rahimi

اول اسم دیتا رو تغییر میدهیم

EDF را انتخاب میکنیم

چون EDF را زدیم سمپل ریت ندارد

دستگاه در نوروگاید: mitsar

رفرنس: LE

حتما Montage در نوروگاید LinkEars باشد

دستگاهی که در ران انتخاب میکنیم: Otherr

***نکته: در PDF بیمار تشخیص نوشته نشود.**

16: دکتر پروین صفوی: Parvin Safavi

اول اسم دیتا رو تغییر میدهیم

EDF را انتخاب میکنیم

چون EDF را زدیم سمپل ریت ندارد

دستگاه در نوروگاید: Other

حتما Montage در نوروگاید LinkEars باشد

دستگاهی که در ران انتخاب میکنیم: Sarmad

17: خانم سارا حسنی: Mrs Hasani

اول اسم دیتا رو تغییر میدهیم

EDF را انتخاب میکنیم

چون EDF را زدیم سمپل ریت ندارد

دستگاه در نوروگاید: other

رفرنس: LE

حتما Montage در نوروگاید LinkEars باشد

دستگاهی که در ران انتخاب میکنیم: Other

***نکته: برای ایشان صفحه دارویی ارسال نمیشود.و باید از Word و PDF حذف شود.**

18:خانم سعیده جعفری:Ms Jafari

اول اسم دیتا رو تغییر میدهم

Text را انتخاب میکنیم

سمپل ریت را روی 500 قرار میدهم

دستگاه در نوروگاید:Other

رفرنس:LE

حتما مونتاژ در نورگاید LinkEars باشد

دستگاهی که در ران انتخاب میکنیم:eWave

***نکته: برای ایشان صفحه دارویی ارسال نمیشود.و باید از Word و PDF حذف شود.**

19:دکتر فرهاد عبدالله وند:Abdollahvand

اول اسم دیتا رو تغییر میدهم

EDF را انتخاب میکنیم

چون EDF را زدیم سمپل ریت ندارد

دستگاه در نوروگاید:other

رفرنس:LE

حتما Montage در نوروگاید LinkEars باشد

دستگاهی که در ران انتخاب میکنیم:Other

20:خانم ایران نژاد:Ms Irannezhad

اول اسم دیتا رو تغییر میدهم

EDF را انتخاب میکنیم

رفرنس:LE

چون EDF را زدیم سمپل ریت ندارد

دستگاه در نوروگاید:Mitsar

دستگاهی که در ران انتخاب میکنیم:Other

***نکته: برای ایشان صفحه دارویی ارسال نمیشود.و باید از Word و PDF حذف شود.**

21:دکتر آتنا فلاح:Fallah

Text را انتخاب میکنیم

اسم دیتا رو تغییر میدهم

سمپل ریت:500

دستگاه در نوروگاید:Other

حتما Montage در نوروگاید LinkEars باشد

در ران دستگاهی که انتخاب میکنیم:Negarandishan

22: دکتر دهقانی: Dehghani

اول EEG را باز میکنیم و فایل EDF و Text استخراج میکنیم
Text را انتخاب میکنیم
مونتاژ: LinkEars
سمپل ریت: 250
دستگاه در نوروگاید: Mitsar
در ران دستگاهی که انتخاب میکنیم: Other

23: دکتر حسینی: Hosseini

اول EEG را باز میکنیم و فایل EDF و Text استخراج میکنیم
Text را انتخاب میکنیم
مونتاژ: LinkEars
سمپل ریت: 250
دستگاه در نوروگاید: Mitsar
در ران دستگاهی که انتخاب میکنیم: Other

24: خانم ملیحه محمودی: Rahnemon Clinic

اول اسم دیتا رو تغییر میدهیم
EDF را انتخاب میکنیم
چون EDF را زدیم سمپل ریت ندارد
دستگاه در نوروگاید: other
رفرنس: LE
حتما Montage در نوروگاید LinkEars باشد
دستگاهی که در ران انتخاب میکنیم: Neurosurve
***نکته: برای ایشان صفحه دارویی ارسال نمیشود. و باید از Word و PDF حذف شود.**

25: دکتر مرتضی طالبی: Talebi

اول اسم دیتا رو تغییر میدهیم
Text را انتخاب میکنیم
مونتاژ: LinkEars
چون EDF را زدیم سمپل ریت ندارد
دستگاه در نوروگاید: Other
در ران دستگاهی که انتخاب میکنیم: Negerandishan

26:دکتر شیوا حقی: Haghi

اول اسم دیتا رو تغییر میدهم

Text را انتخاب میکنیم

مونتاژ: LinkEars

سمپل ریت: 500

دستگاه در نوروگاید: Other

در ران دستگاهی که انتخاب میکنیم: ewave

***نکته: برای ایشان صفحه دارویی ارسال نمیشود. و باید از Word و PDF حذف شود.**

نکته: کمترین عدد EO

بیشترین عدد EC

27:دکتر الهه مرادخانی: Moradkhani

اول اسم دیتا رو تغییر میدهم

Text را انتخاب میکنیم

مونتاژ: LinkEars

سمپل ریت: 500

دستگاه در نوروگاید: Other

در ران دستگاهی که انتخاب میکنیم: ewave

***نکته: کمترین عدد EO**

بیشترین عدد EC

28:خانم شاه حسینی: Movasatschool

اول اسم دیتا رو تغییر میدهم

Text را انتخاب میکنیم

مونتاژ: LinkEars

سمپل ریت: 500

دستگاه در نوروگاید: Other

در ران دستگاهی که انتخاب میکنیم: ewave

***نکته: برای ایشان صفحه دارویی ارسال نمیشود. و باید از Word و PDF حذف شود.**

28:دکتر سعید عسکری: Dr Askari

اول اسم دیتا رو تغییر میدهم

Text را انتخاب میکنیم

مونتاژ: LinkEars

سمپل ریت: 500
دستگاه در نوروگاید: Other
در ران دستگاهی که انتخاب میکنیم: ewave

29: دکتر کوروش سلیمانی: Dr Soleymani

اول اسم دیتا رو تغییر میدهیم
EDF را انتخاب میکنیم
مونتاژ: LinkEars
چون EDF را زدیم سمپل ریت ندارد
دستگاه در نوروگاید: Mitsar
در ران دستگاهی که انتخاب میکنیم: Other
***نکته مهم: در PDF رپورت بیماران تشخیص و دارو حتما حذف شود**

30: خانم گلچهره گنجه: Ms Ganjeh

اول اسم دیتا رو تغییر میدهیم
Text را انتخاب میکنیم
مونتاژ: LinkEars
سمپل ریت: 500
دستگاه در نوروگاید: Other
در ران دستگاهی که انتخاب میکنیم: ewave
***نکته: کمترین عدد EO**

بیشترین عدد EC

***نکته: برای ایشان صفحه دارویی ارسال نمیشود. و باید از Word و PDF حذف شود.**

30: دکتر صحراییان: Dr Sahraeiyan

اول اسم دیتا رو تغییر میدهیم
EDF را انتخاب میکنیم
مونتاژ: LinkEars
چون EDF را زدیم سمپل ریت ندارد
دستگاه در نوروگاید: Mitsar
در ران دستگاهی که انتخاب میکنیم: Other

31: خانم جوادی فر: Javadifar

اول اسم دیتا رو تغییر میدهیم
EDF را انتخاب میکنیم
مونتاژ: LinkEars
چون EDF را زدیم سمپل ریت ندارد

دستگاه در نوروگاید: Mitsar

در ران دستگاهی که انتخاب میکنیم: Other

***نکته: برای ایشان صفحه دارویی ارسال نمیشود. و باید از Word و PDF حذف شود.**

32: دکترمینا دهقانی: Dr Dehghani

اول اسم دیتا رو تغییر میدهیم

Text را انتخاب میکنیم

سمپل ریت 128

دستگاه در نوروگاید: Other

حتما Montage در نوروگاید LinkEars باشد

دستگاهی که در ران انتخاب میکنیم: Sarmad

***نکته: از نوروگاید باید خودمان EDF استخراج کنیم و آنرا ران بگذاریم**

33: خانم اعظم شجاعی

Text را انتخاب میکنیم

اسم دیتا رو تغییر میدهیم

سمپل ریت: 500

دستگاه در نوروگاید: Other

حتما Montage در نوروگاید LinkEars باشد

در ران دستگاهی که انتخاب میکنیم: Negarandishan

***نکته: برای ایشان صفحه دارویی ارسال نمیشود. و باید از Word و PDF حذف شود**

34: خانم نوش افرین علی اکبری

EDF را انتخاب میکنیم

مونتاژ: LinkEars

چون EDF را زدیم سمپل ریت ندارد

دستگاه در نوروگاید: other

در ران دستگاهی که انتخاب میکنیم: Neurocaie

***نکته: برای ایشان صفحه دارویی ارسال نمیشود. و باید از Word و PDF حذف شود.**

نکته 2: در صورتی که داده نویز زیادی داشت از نوروگاید مجدد فایل EDF درمیاوریم و بعد آنرا ران میگذاریم. در

این صورت در app دستگاه را Sarmad انتخاب میکنیم.

نکته 3: دیگر در مورد دستگاه NeuroGuide Channels برای مواقعی هست که دیتایی ایراد و نویز زیادی دارو

که مجبور هستیم خودمان به صورت دستی بعضی از جاها را حذف کنیم در آن موقع دیتایی که خودمان تولید

کردیم را با استفاده از این گزینه ران میگذاریم.

35: خانم رادفر

EDF را انتخاب میکنیم

مونتاژ: LinkEars

چون EDF را زدیم سمپل ریت ندارد

دستگاه در نوروگاید: Deymed

در ران دستگاہی کہ انتخاب میکنیم: Deymed

***نکته: برای ایشان صفحہ دارویی ارسال نمیشود. و باید از Word و PDF حذف شود.**